

INSTRUCCIONES DE USO

Indicación

Cavex Outline, Impression Paste sin eugenol es un material para la toma de impresiones en edéntulos. La pasta de impresión mezclada fluye con gran facilidad bajo una ligera presión, evitando cualquier deformación de tejidos blandos en el momento de sacar la impresión y reproduciendo con precisión todos los detalles.

Por lo tanto, Cavex Outline, Impression Paste sin eugenol está especialmente indicada para rebase así como para la segunda impresión con la cubeta individual.

No contiene eugenol, no proporcionando por ello molestias al paciente.

Dosificación

Cavex Outline, Impression Paste sin eugenol se presenta como sistema de 2 pastas en los colores azul y blanco. Dosificando en el bloque de mezcla tiras de la misma longitud, conseguimos una mezcla homogénea, con la proporción: 1:2,2 g de pasta azul respecto a la pasta blanca.

Nota. Una proporción distinta de mezcla retrasará el fraguado.

Tiempo de mezcla

Mezclar intensamente ambas pastas en el bloque de mezcla suministrado, usando una espátula resistente de acero inoxidable, hasta conseguir un color homogéneo. Esta operación requiere unos 30 segundos.

La espátula debe limpiarse con un pañuelo de papel antes de que se inicie el fraguado.

Sacar la impresión

Aplicar la pasta mezclada en la prótesis o en la cubeta de impresión, colocándola en la boca al cabo de minuto y medio de mezclarla, ejerciendo una ligera presión. El tiempo de fraguado bucal es de 2-3 min.

Sacar cuidadosamente la cubeta de la boca y enjuagar ampliamente la impresión con agua corriente fría.

Vaciado

La impresión se puede vaciar directamente con yeso.

La impresión permanece estable durante 7 días.

Propiedades

Los valores característicos comprobados según la Especificación nr.16 ADA para Cavex Outline, Impression Pasta sin eugenol son los siguientes:

Consistencia	33 mm
Tiempo de fraguado inicial	3 min
Tiempo de fraguado final	4 min
Dureza de penetración	1,3 mm
Superficie de vaciado	cumple

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse sólo como iniciación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros; no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente.

Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará para cualquier daño y perjuicio, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

almacenar a una temperatura inferior a 25°C